



La Lancette Sécurité ACTI-LANCE

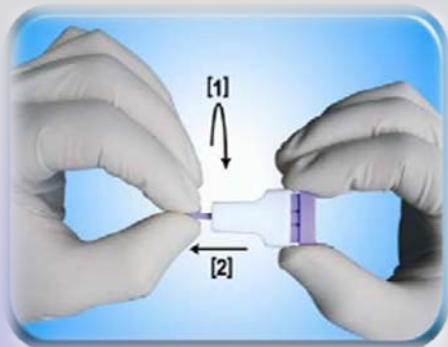

1 Tourner (un tour) **2** tirer simultanément afin d'enlever le capuchon protecteur.



3 Placer le bord de la lancette le long de l'ongle (à environ 2mm), et appuyer sur le bouton poussoir.

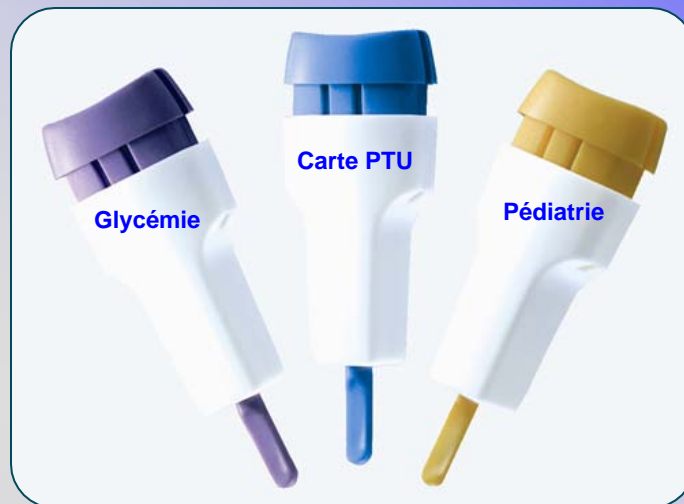

Idéal pour la glycémie.

Aiguille: 28G (0.36 mm)
Profondeur : 1,5mm

Idéal pour le contrôle prétransfusionnel ultime (carte PTU) et la plupart des tests réalisés sur sang capillaire.

Aiguille: 23G (0.63 mm) Profondeur : 1,8mm



Idéal pour le prélèvement au bout du talon (NEO-NAT).

Lame : 17G (1.5 mm)
Profondeur : 2.0 mm



Laboratoires **NEPHROTEK**
Faire Plus Pour La Santé

Gare Routière Sogaris – BP 122 -94524 RUNGIS Cédex
nephrotek@nephrotek.fr www.nephrotek.fr

T : 01 46 87 12 82 F : 01 46 86 24 88