



DECouvrez NOTRE GAMME DE TROD

Résultats d'une étude présentée au congrès RICA 2014 réalisée par l'Hôpital d'Instruction des Armées Bégin, Saint-Mandé¹

	ARN viral détecté
TOYO Positif	59
TOYO Négatif	1*

● SENSIBILITÉ : 98,7 %

*échantillon de primo-infection donnant aussi un résultat négatif sur Vidas

¹Evaluation de la trousse rapide d'orientation diagnostique (TROD) TOYO anti-HCV par méthode immunochromatographique pour le dépistage de l'hépatite C, E. Dedôme et al, 2014

Etude réalisée au Centre National de Référence des Hépatites sur 494 échantillons de sang capillaire, Hôpital Henri Mondor, Créteil

	Anticorps anti-VHC (Vitros Eci anti-HCV test)	
	Positif	Négatif
TOYO Positif	304	3
TOYO Négatif	13 ^a	174 ^b

^a 7 tests non interprétables et 5 individus non testés (quantité insuffisante de sang capillaire)

^b 3 tests non interprétables et 4 individus non testés (quantité insuffisante de sang capillaire)

● SENSIBILITÉ : 96,2 % - SPÉCIFICITÉ : 98,2 %

TOYO VHC

Boîte de 40 tests
Ref. : THC02-40



CE 1434

INSTI™ VIH 1/2

En kit unitaire
Ref. : 90-1015



CE 0543

INSTI™ Multiplex VIH & Syphilis

En kit unitaire
Ref. : 90-1028



CE 0543

TOYO : Dispositif Médical de Diagnostic In Vitro CE 1434, fabriqué par Turklab. Consulter la notice pour plus d'informations.

INSTI™ VIH / INSTI™ MULTIPLEX : Dispositifs Médicaux de Diagnostic In Vitro CE 0543, fabriqués par Biolytical Laboratories. Consulter la notice pour plus d'informations.

Mise à jour : septembre 2016.

Distribué exclusivement par Les Laboratoires Nephrotek
Les Laboratoires Nephrotek sont certifiés NF EN ISO 13485 / 2003



Laboratoires NEPHROTEK
Faire Plus Pour La Santé

Sogaris 122 - 94524 RUNGIS CEDEX - France
Tél. : 01 46 87 12 82 - Fax : 01 46 86 24 88

www.nephrotek.fr



TROD HÉPATITE C



COMPLET
40 tests par kit
Accessoires inclus



FIABLE
Évalué au CNR*
des hépatites



PRATIQUE
Possibilité d'un protocole
combiné validé avec le
TROD INSTI™
VIH / SYPHILIS



*CNR : Centre National de Référence



Laboratoires NEPHROTEK
Faire Plus Pour La Santé

www.nephrotek.fr



Bras tendu tout le long du corps (position décline), main au niveau de la taille

Mode d'emploi

Conseils pour le prélèvement de sang au bout du doigt

Prélèvement facilité par le lavage préalable des mains à l'eau chaude

Prélèvement



1 Identifier le test TOYO VHC puis désinfecter le doigt (en évitant la pince)



2 Piquer le doigt propre avec l'autopiqueur fourni



3 Former une grosse goutte de sang suspendue



4 Recueillir la goutte de sang suspendue en approchant la pipette **horizontalement** de la goutte (ne pas appuyer sur la poire de la pipette)



5 Répéter les opérations 3 et 4 jusqu'à ce que le sang ait atteint le trait noir de la pipette

Réalisation du test



1 Presser la poire de la pipette pour vider le sang dans la zone de dépôt




2 Délivrer deux gouttes de diluant dans la zone de dépôt



3 lire après **15 MIN** (ne pas lire après 20 minutes)

Interprétation des résultats

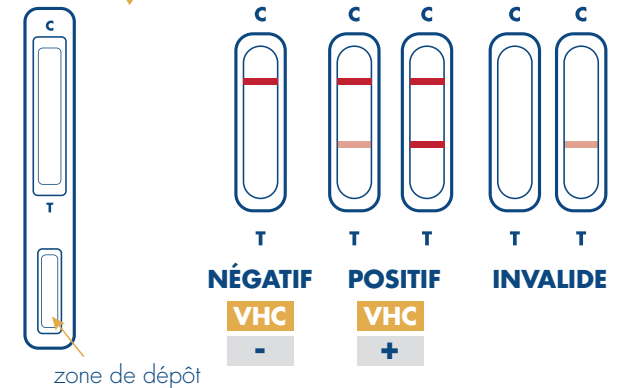

Tout test positif doit être confirmé en laboratoire ou en CeGIDD