



UNE GAMME COMPLETE

Etude réalisée au Centre National de Référence des Hépatites sur 494 échantillons de sang capillaire, Hôpital Henri Mondor, Créteil

	Anticorps anti-VHC (Vitros Eci anti-HCV test)	
	Positif	Négatif
TOYO® Positif	304	3
TOYO® Négatif	2 (13 ^a)	174 ^b

^a Sur les 13 échantillons testés avec Toyo nouvelle génération, 11 donnent un résultat positif (seuls 2 restent négatifs)

^b 3 tests non interprétables et 4 individus non testés (quantité insuffisante de sang capillaire)

● SENSIBILITÉ : 99,4 % - SPÉCIFICITÉ : 98,2 %

Résultats d'une étude présentée au congrès RICA 2014 réalisée par l'Hôpital d'Instruction des Armées Bégin, Saint-Mandé¹

	ARN viral détecté
TOYO® Positif	59
TOYO® Négatif	0 (1*)

● SENSIBILITÉ : 100 %

*échantillon de primo-infection donnant aussi un résultat négatif sur Vidas

¹Evaluation de la trousse rapide d'orientation diagnostique (TROD) TOYO anti-HCV par méthode immunochromatographique pour le dépistage de l'hépatite C, E. Dedôme et al, 2014

TOYO® : Dispositif Médical de Diagnostic In Vitro CE 1434, fabriqué par Turklab. Consulter la notice pour plus d'informations.

INSTI® VIH / INSTI® MULTIPLEX : Dispositifs Médicaux de Diagnostic In Vitro CE 0543, fabriqués par Biotlytical Laboratories. Consulter la notice pour plus d'informations.

Mise à jour : mai 2019.

Distribué exclusivement par Les Laboratoires Nephrotek
Les Laboratoires Nephrotek sont certifiés NF EN ISO 13485 / 2003

TOYO® VHC

Boîte de 40 tests
Ref. : THC02-40



CE 1434

INSTI® VIH 1/2

En kit unitaire
Ref. : 90-1015



CE 0543

INSTI® Multiplex VIH & Syphilis

En kit unitaire
Ref. : 90-1028



CE 0543

TOYO® HBsAg (VHB)

Coffret de 40 tests unitaires
Ref. : THB04-40



CE 1434

TOYO® anti-HBs (VHB) statut vaccinal hépatite B

Coffret de 40 tests unitaires
Ref. : THB02-40



CE 1434

autotest VIH®

En test unitaire
Ref. : AS-VIH 001



CE 0459



TROD HÉPATITE C
NOUVELLE GÉNÉRATION



RAPIDE
Résultat en
15 min



FIABLE
Évalué au **CNR***
des hépatites
TRÈS HAUTE SENSIBILITÉ
99,4 % à 100 %



PRATIQUE
Un protocole combiné
validé avec le
TROD INSTI®
VIH / SYPHILIS



*CNR : Centre National de Référence



Laboratoires **NEPHROTEK**
Faire Plus Pour La Santé
43 rue de Bellevue - 92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : 01 46 00 40 40 - Fax : 01 46 00 40 41

www.nephrotek.fr



Bras tendu tout le long du corps (position décline), main au niveau de la taille

Mode d'emploi

Conseils pour le prélèvement de sang au bout du doigt

Prélèvement facilité par le lavage préalable des mains à l'eau chaude

Prélèvement



1 Identifier le test TOYO® VHC puis désinfecter le doigt (en évitant la pince)




2 Piquer le doigt propre avec l'autopiqueur fourni



3 Former une grosse goutte de sang suspendue



4 Recueillir la goutte de sang suspendue en approchant la pipette horizontalement de la goutte (ne pas appuyer sur la poire de la pipette)

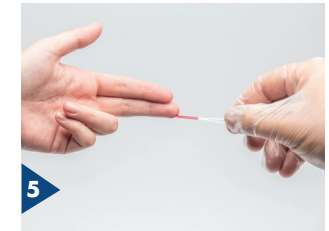

5 Répéter les opérations 3 et 4 jusqu'à ce que le sang ait atteint le trait noir de la pipette

Réalisation du test



1 Presser la poire de la pipette pour vider le sang dans la zone de dépôt




2 Délivrer deux gouttes de diluant dans la zone de dépôt



3 lire après **15 MIN** (ne pas lire après 20 minutes)

Interprétation des résultats

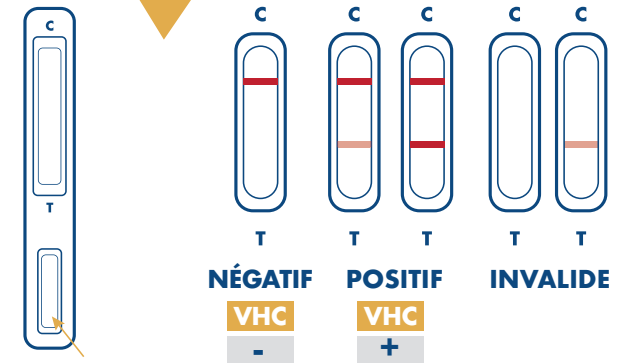

zone de dépôt