

1



Désinfecter le doigt du patient



Piquer le doigt propre avec l'autopiqueur fourni



Former une grosse goutte de sang suspendue



50µL
TOYO® VHB

Recueillir la goutte de sang avec la **pipette TOYO® HBsAg** tenue **horizontalement**, jusqu'au trait noir (**ne pas presser la poire de la pipette**)



TOYO® VHB

Presser la poire de la pipette pour vider le sang dans la zone de dépôt

2



TOYO® VHB

Délivrer **une goutte de diluant** dans la zone de dépôt et attendre 15 minutes



50µL
TOYO® VHC

Recueillir la goutte de sang avec la **pipette TOYO® VHC** tenue **horizontalement**, jusqu'au trait noir



TOYO® VHC

Presser la poire de la pipette pour vider le sang dans la zone de dépôt



Délivrer **deux gouttes de diluant** dans la zone de dépôt et attendre 15 minutes



50µL
INSTI®

Recueillir la goutte de sang avec la **pipette INSTI®** tenue **horizontalement**, jusqu'au trait noir

3



Presser la poire de la pipette pour vider le sang dans le flacon 1



Refermer le flacon 1 et l'homogénéiser par des inversions



Vider le contenu du flacon 1 dans la cupule et attendre que le liquide ait traversé la membrane



Homogénéiser par inversion le flacon 2 puis vider son contenu dans la cupule et attendre que le liquide ait traversé la membrane



Répéter l'opération précédente pour le flacon 3 et lire le résultat du test **immédiatement**

INTERPRETATION DES TESTS

VIH



VIH

-



VIH

+

VHB



VHB

-



VHB

+

VHC



VHC

-



VHC

+

**1 piqûre
3 résultats**