



Bras tendu le long du corps (position déclive), main au niveau de la taille

### Conseils pour le prélèvement de sang total au bout du doigt

Prélèvement facilité par le lavage préalable des mains à l'eau chaude



**1** Identifier le test INSTI™  
Piquer le doigt propre du patient et former une grosse goutte de sang suspendue.



**2** Recueillir la première goutte de sang avec la pipette **horizontale** sans presser la poire de la pipette.  
Former une nouvelle goutte de sang suspendue et la recueillir en approchant la pipette horizontalement de la goutte.  
Répéter l'opération jusqu'à ce que le sang ait atteint le trait noir de la pipette.




**3** Presser la poire de la pipette pour vider le sang dans le flacon 1.  
Refermer le flacon et l'homogénéiser par 2 inversions.

**4** Vider le contenu du flacon 1 dans la cupule et attendre que le liquide ait traversé la membrane.  
Répéter l'opération avec les flacons 2 et 3.  
Lire le résultat du test immédiatement.

### Lecture/Interprétation

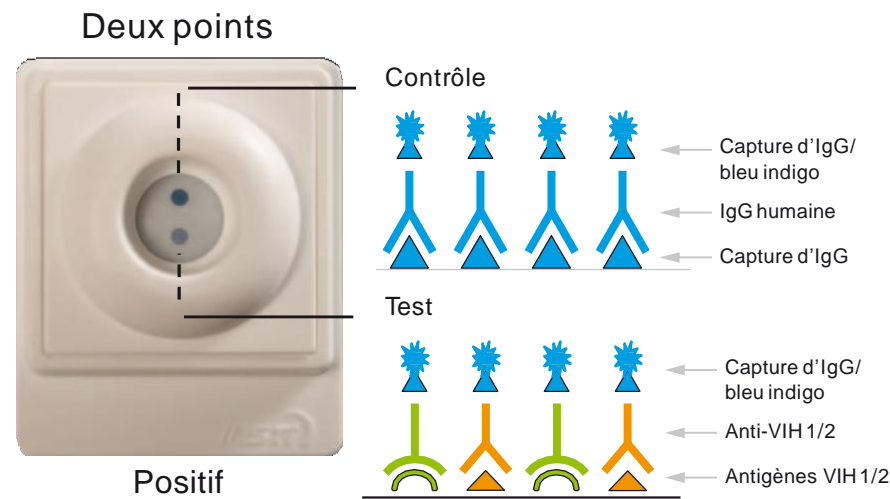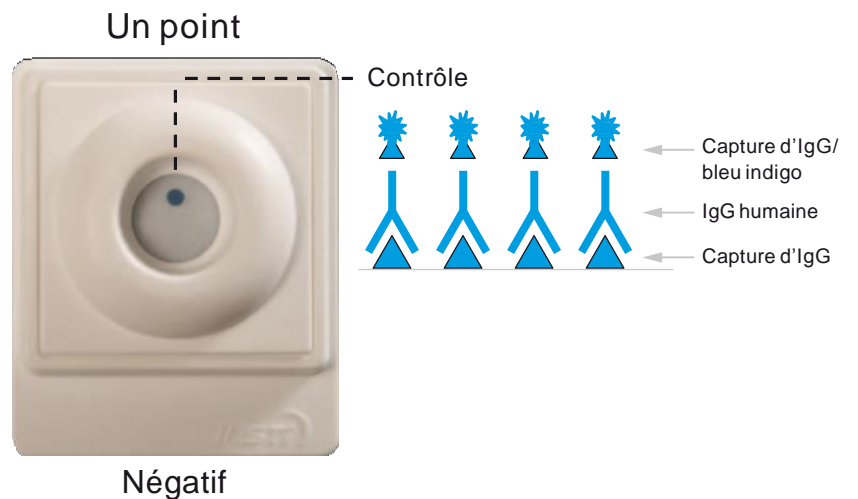

### Résultats ininterprétables

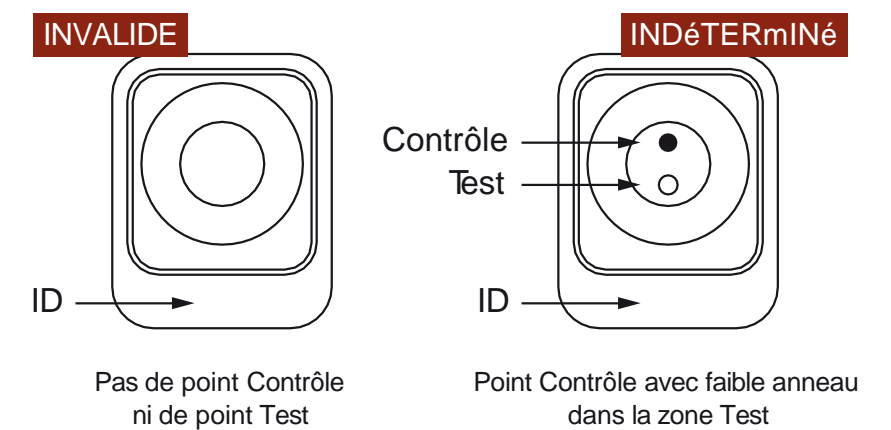

**Recommandation :** tout test ininterprétable doit être répété avec un nouvel échantillon sanguin en utilisant un nouveau test INSTI et de nouveaux accessoires