



Bras tendu le long du corps (position déclive), main au niveau de la taille Prélèvement facilité par le lavage préalable des mains à l'eau chaude



**1** Identifier le test INSTI™  
Piquer le **doigt propre** du patient et former une **grosse goutte** de sang suspendue.



**2** Recueillir la première goutte de sang avec la pipette **horizontale** sans presser la poire de la pipette.

- Former une **nouvelle goutte de sang** suspendue et la recueillir en approchant la pipette **horizontalement** de la goutte.
- Répéter l'opération jusqu'à ce que le sang ait atteint le **trait noir** de la pipette.



**3** Presser la poire de la pipette pour vider le sang dans le **flacon 1**.



- Refermer le flacon et l'homogénéiser par 2 inversions.




**4** Vider le contenu du **flacon 1** dans la cupule et attendre que le liquide ait traversé la membrane.

- Homogénéiser par **inversion le flacon 2** puis vider son contenu dans la cupule et attendre que le liquide ait traversé la membrane.
- Répéter l'opération précédente pour le **flacon 3** et lire le résultat du test **immédiatement**.

### Lecture/Interprétation

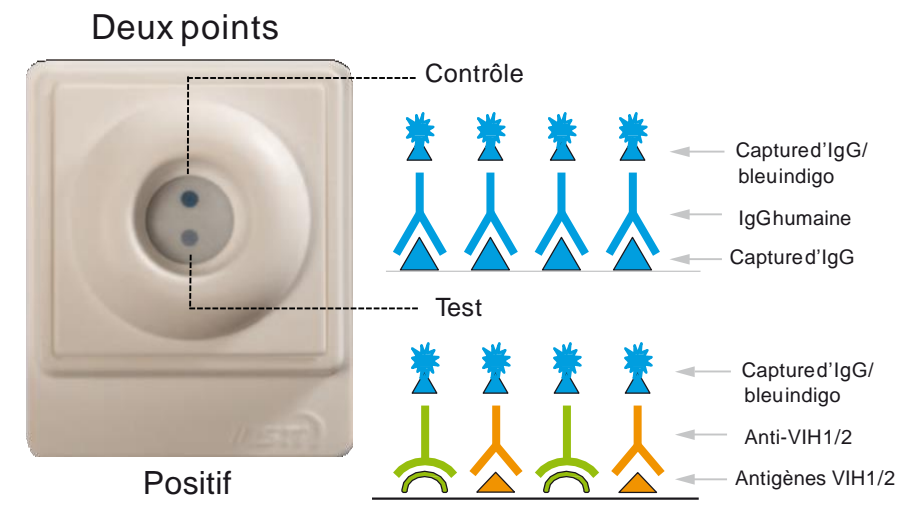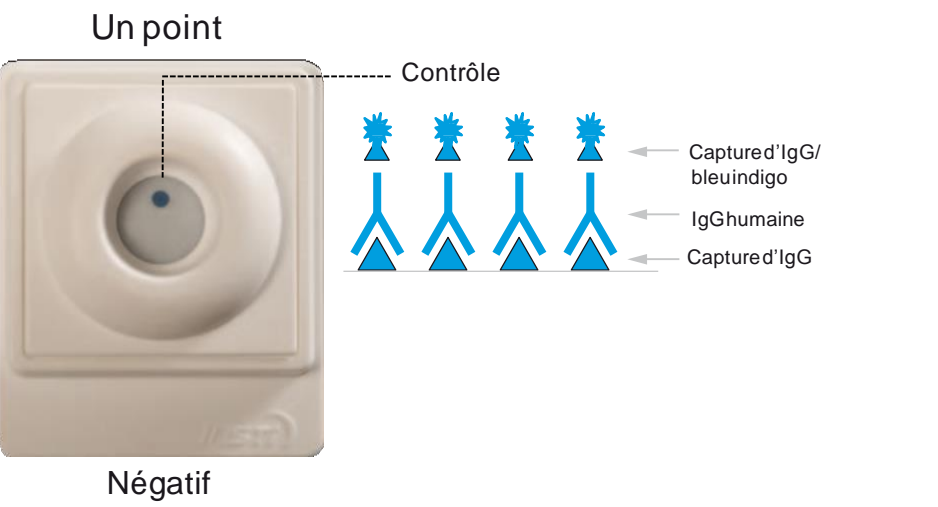

### Résultats ininterprétables

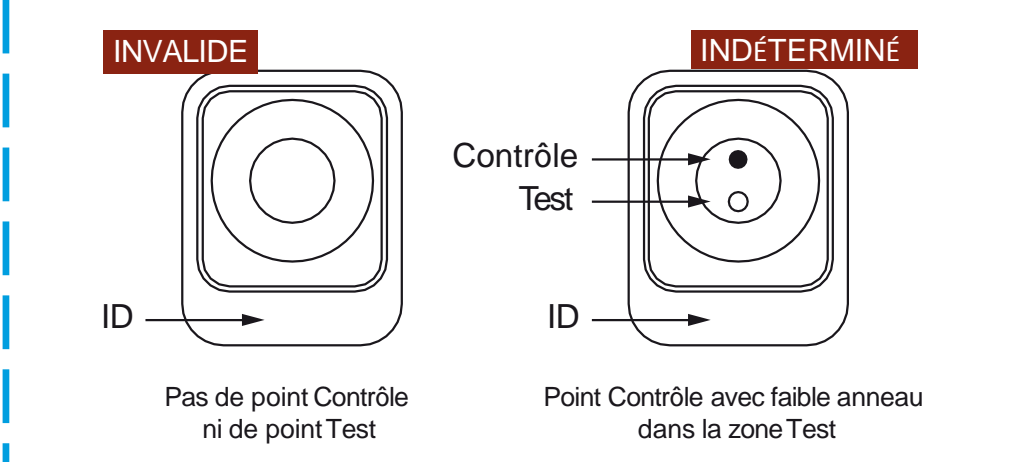

**Recommandation :** tout test ininterprétable doit être répété avec un nouvel échantillon sanguin en utilisant un nouveau test INSTI et de nouveaux accessoires