



Bras tendu tout le long du corps (position décline), main au niveau de la taille

### Mode d'emploi

Conseils pour le prélèvement de sang au bout du doigt

Prélèvement facilité par le lavage préalable des mains à l'eau chaude

#### Prélèvement



1 Identifier le test TOYO® VHC puis désinfecter le doigt (en évitant la pince)




2 Piquer le doigt propre avec l'autopiqueur fourni



3 Former une grosse goutte de sang suspendue



4 Recueillir la goutte de sang suspendue en approchant la pipette **horizontalement** de la goutte (ne pas appuyer sur la poire de la pipette)

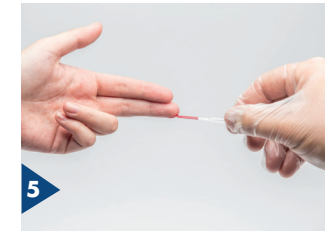

5 Répéter les opérations 3 et 4 jusqu'à ce que le sang ait atteint le trait noir de la pipette

#### Réalisation du test



1 Presser la poire de la pipette pour vider le sang dans la zone de dépôt




2 Délivrer deux gouttes de diluant dans la zone de dépôt



3 lire après **15 MIN** (ne pas lire après 20 minutes)

#### Interprétation des résultats

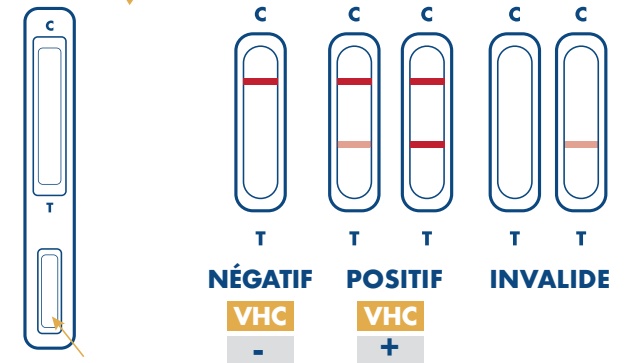

Tout test positif doit être confirmé en laboratoire ou en CeGIDD